

COMPEED Plastry na pęcherze średnie



Nasza cena: 27,90 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: COMPEED Plastry na pęcherze średnie

Postać: plaster

Opakowanie: 5 szt

Działanie: Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel zawierający cząsteczki absorbujące wilgoć. Plaster COMPEED® działa jak druga skóra, pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry, aby: przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez pęcherze, ochraniać przed otarciami, zapewniać szybkie gojenie się ran.

Pozostaje na miejscu przez kilka dni. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Plastry polecane są na większe pęcherze, szczególnie na pięcie.

Dawkowanie: Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta pęcherzem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki. Usuń górną warstwę papierową plastra, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (uwaga: może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni). Aby usunąć plaster, nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągaj wzdłuż skóry.