

Protefix krem mocujący z aloesem 40 ml

Nasza cena: 19,80 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	47 g
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Protefix krem mocujący Ekstra z aloesem

Postać: krem

Dawka: -

Opakowanie: 47 g

Skład:

Mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, ekstrakt Aloe Vera Barbardensis, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina i metylparaben. Nie zawiera cynku.

Działanie:

Pewnie mocuje protezę i pozwala na spożywanie pokarmów, na jakie ma się ochotę. Uszczelnia protezę i zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę, co zmniejsza ryzyko stanów zapalnych. Aloe przyspiesza gojenie i działa ochronnie na błonę śluzową jamy ustnej. Można stosować dowolnie często, nawet po każdym posiłku.

Działania niepożądane:

Niektóre osoby mogą być wrażliwe na składniki kremu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii należy przerwać stosowanie kremu i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Dawkowanie:

Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną protezę. Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami), w odstępach jak na rysunku. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy. Protezę założyć i przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu. Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju. **Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda.** Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

