

Protefix podściółki mocujące do szczęki 30 szt



Nasza cena: 22,95 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Protefix podściółki moc. d/szczęki

Postać: -

Dawka: -

Opakowanie: 30 szt.

Skład:

Alginian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Dawkowanie:

1. Sprawdzić wielkość protezy:

przy małych protezach należy

przyciąć podściółkę odpowiednio

nożyczkami wzdłuż jej prostego

brzegu.

2. Pościółkę zwilżyć zanurzając ją

na ok. 10 sekund w letniej wodzie

po czym wyjąć i pozwolić wodzie

obcieknąć.

3. Podściółkę nałożyć dowolną stroną

na zwilżoną protezę. Tylne 2 mm

protezy musi pozostać nieprzykryte

4. Podściółkę docisnąć zaczynając

od środka w kierunku obrzeży aż

będzie w każdym miejscu gładko

przylegała.

Uwagi:

Podściółki przeznaczone są tylko do protez całkowitych. Nie stosować przy protezach częściowych. Podściółki mocujące należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy.