

## Protifix proszek mocujący 50 g



Nasza cena: 25,65 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 g
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Nazwa:** Protifix proszek mocujący  
**Postać:** prosz.  
**Dawka:** -  
**Opakowanie:** 50 g  
**Skład:**

100 g proszku mocującego Protifixâ ekstra-mocnego zawiera: alginian sodowy 100 g.

#### Wskazania:

Proszek mocujący do protez zębowych.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

#### Działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

#### Dawkowanie:

Zwilżoną protezę posypać równomiernie cienką warstwą **Protifixâ** proszku mocującego ekstra-mocnego. Natychmiast po założeniu protezy przylega ona pewnie na wiele godzin do podniebienia lub dziąsła. W przypadku przedwczesnego obluźowania, np. po wypiciu dużej ilości płynów, wystarczy ponownie posypać protezę cienką warstwą **Protifixâ** proszku mocującego ekstra-mocnego. Proteza znowu trzyma pewnie przez wiele godzin. Ewentualne pozostałości proszku mocującego można zmyć szczoteczką do zębów i spłukać pod bieżącą wodą. Stwardniałe resztki preparatu można usunąć za pomocą wacika zwilżonego w oleju jadalnym.

Proszek należy dozować przechylając lekko pojemnik i stukając w niego palcem wskazującym. W celu uniknięcia nałożenia nadmiernej ilości proszku należy uważać, aby nie naciskać pojemnika

**Środki ostrożności:**

Stan jamy ustnej i protezy należy regularnie konsultować z lekarzem. Stosowanie proszku mocującego dozwolone jest tylko na zdrową śluzówkę jamy ustnej. Nie stosować długotrwale bez konsultacji z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności.